



Gebrauchsanweisung Bio-Brust-/Bauchwickel

D	Bio-Brust-/Bauchwickel – Gebrauchsanweisung.....	2
GB	Organic Chest/Tummy Wrap – Instructions for Use.....	7
F	Bouillotte sèche bio pour poitrine et ventre – Notice d'utilisation.....	12
I	Set bio per impacchi al petto e alla pancia – Istruzioni per l'uso	16
NL	Bio-borst-/buikkompres – Gebruiksaanwijzing.....	18
ES	Compresa abdominal/para pecho ecológica – Instrucciones de uso	23
RU	Био-компресс на грудь/живот – Инструкция по применению	34

 GRÜNSPECHT
Naturprodukte GmbH
Münchener Str. 21
85123 Karlskron, Germany

 
Version: 2021-04-30
GA-064-03

www.gruenspecht.de

Bio-Brust-/Bauchwickel – Gebrauchsanweisung

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Sie haben mit diesem Naturprodukt eine gute Wahl getroffen! Hier haben wir Ihnen wichtige Informationen zu diesem Produkt zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese – insbesondere die Sicherheitshinweise sowie die Hinweise zur Anwendung und Pflege – genau durch.

 Bitte Gebrauchsanweisung und Verpackung beachten und aufbewahren!

 **LOT** Siehe Verpackung!

1. Geltungsbereich

Diese Gebrauchsanweisung gilt für folgende Produkte:

REF 672-00 Bio-Brust-/Bauchwickel GOTS, Größe 1 (1-12 Monate)

673-00 Bio-Brust-/Bauchwickel GOTS, Größe 2 (1-5 Jahre)

2. Produktinhalt

Bio-Brust-/Bauchwickel, Bio-Traubenkernkissen, Gebrauchsanweisung

3. Zweckbestimmung und bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Bio-Brust-/Bauchwickel kann zur kurzzeitigen Wärmeanwendung zur Steigerung des Wohlbefindens und gezielt zur

Linderung von körperlichen Beschwerden im Rahmen der Wärmetherapie eingesetzt werden. Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt und kann bei Babys und Kindern angewendet werden.

Durch die flexiblen Klettverschlüsse kann der Wickel optimal an den Körperumfang angepasst werden und ermöglicht so einen sicheren und bequemen Sitz. Der weiche Baumwollstoff im Inneren schmeichelt der Haut und speichert hervorragend Wärme. Das Traubenkernkissen kann in der dafür vorgesehenen Einlegetasche zuverlässig fixiert werden. Traubenkerne können Wärme sehr lang speichern und geben diese langsam wieder an die Haut ab.

4. Anwendungsgebiete

Der Bio-Brust-/Bauchwickel ist als Wärmeauflage ausschließlich für die folgenden Anwendungsgebiete geeignet:

Brustwickel	Bauchwickel
Erkältung	Bauchschmerzen/-krämpfe Darmträgheit und Blähungen

5. Anwendungs- und Erwärmungshinweise

Vor dem Erwärmen des Kissens auf untypischen Geruch, Stock- oder Brandflecken prüfen und bei Vorhandensein sofort entsorgen. Bitte das Traubenkernkissen zum Erwärmen vorher aus dem Wickel heraus nehmen!

Zur Erwärmung gibt es folgende Möglichkeiten:

- Im nicht vorgeheizten Backofen bei max. 110 °C für max. 3 Minuten erwärmen

• In der Mikrowelle:

REF Größe 1, 672-00: max. 180 Watt für max. 1 Minute erwärmen

REF Größe 2, 673-00: max. 300 Watt für max. 1 Minute erwärmen

(Angaben des Mikrowellenherstellers beachten!)

- Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen

Direkt nach dem Erhitzen die Wärme durch Schütteln gleichmäßig im Kissen verteilen! Anschließend das Innenkissen in den Wickel zurücklegen.

Bei den ersten Erwärmungen kann es an der Oberfläche zu einer leichten Feuchtigkeitsbildung kommen, die aber bei wiederholten Anwendungen verschwindet.

6. ⚠ ACHTUNG! Wichtige Sicherheitshinweise!

Halten Sie sich unbedingt an die angegebenen Erwärmungshinweise, da längere Zeiten oder höhere Energieleistungen zu Schäden führen können (Entflammungs- und Verbrennungsgefahr!). Wickel nicht mit erhitzen! Prüfen Sie vor einer Erwärmung des Kissens in der Mikrowelle, dass eine Erhitzung von Körnerprodukten in der Gebrauchsanweisung des Herstellers erlaubt ist. Innenkissen von einer erwachsenen Person, nur un-

ter Aufsicht und nicht feucht erwärmen! Nachdem das erwärmte Innenkissen zurück in den Wickel gelegt wurde, bitte die Temperatur des Wickels auf Eignung für Babys (max. 43 °C) an Ihrer Armbeuge prüfen! Kissen vor dem nächsten Erwärmen abkühlen lassen! Das Produkt sollte keinesfalls als Kopfkissen oder Sitzgelegenheit verwendet werden.

Bitte suchen Sie bei anhaltenden oder sich verschlechternden Symptomen einen Arzt auf. Verwenden Sie das Kissen nicht bei akuten und chronischen, entzündlichen oder fieberhaften Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, frischen Hämatomen, Blutergüssen und offenen Wunden sowie bei Personen mit verringertem Schmerzempfinden. Bei bestehenden Haut-, Herz-, Venen-, Diabetes- oder Tumorerkrankungen bitte vor der Anwendung an einen Arzt wenden. Achten Sie auf unversehrte Nähte! Bei losen Traubenkernen besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen! Sollten sich Nähte geöffnet haben und lose Kerne austreten, entsorgen Sie das Produkt und die losen Kerne sofort und unzugänglich für Kinder. Wird das Produkt bei Babys unter 1 Jahr angewendet, sollte die Temperatur des Kindes während der Anwendung regelmäßig kontrolliert werden, um Überhitzung auszuschließen!

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

7. Pflegehinweise und Lagerung

Der Wickel (ohne Traubenkernkissen!) ist bei 30 °C in der Maschine waschbar. Bitte beachten Sie die Pflegesymbole am Produkt!

Das mit Traubenkernen gefüllte Innenkissen nicht waschen, um Fäulnis/Schimmelbildung zu verhindern! Produkt trocken lagern! Vor Feuchtigkeit schützen!

8. Hinweise zur Haltbarkeit und Entsorgung

Das Produkt sollte bei normalem Gebrauch nach 4 Jahren ersetzt werden. Das Produkt kann im Hausmüll entsorgt und ohne Probleme thermisch verwertet werden. Die einzelnen Bestandteile der Verpackung bitte sortenrein trennen und dem entsprechenden Recycling-System zuführen. Bitte beachten Sie die regionalen Entsorgungsrichtlinien.

9. Materialzusammensetzung

	Innenkissen:	Wickel:
Stoff:	100% Baumwolle (kontrolliert biologischer Anbau)	100% Baumwolle (kontrolliert biologi- scher Anbau)
Füllung:	Traubenkerne (kontrol- liert biologischer Anbau)	---

10. Erläuterung der verwendeten Symbole

 Hersteller	 Achtung!
 Artikelnummer	 Chargennummer
 Herstellungsdatum (TT.MM.JJ)	
 Gebrauchsanweisung beachten!	
 Vor Nässe schützen!	 Medizinprodukt
 Mikrowelle	 Backofen

Organic Chest/Tummy Wrap – Instructions for Use

Dear Customer,

Thank you for buying this product. You have made a good choice by buying this natural product. Below we have compiled important product information for you. Please read this carefully, in particular the safety advice, as well as the advice on how to use and care for the product.

 Please follow the instructions and retain the instruction sheet and the packaging!

  See Packaging!